



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY MIỄN DỊCH EXR110

I. KHỞI ĐỘNG MÁY

Bước 1: Kiểm tra kết nối dây nguồn, các cổng kết nối. Bật công tắc nguồn bên trái máy.

Bước 2: Ở màn hình đăng nhập, tài khoản và mật khẩu đăng nhập là **admin**.

II. CHẠY BỆNH NHÂN

Bước 1: Đặt thẻ hóa chất ở khu vực đọc thẻ **FRID** và bấm **READ CARD**. Mỗi hộp hóa chất chỉ cần đọc thẻ 1 lần duy nhất.

Bước 2: Chọn chế độ đọc đơn hoặc đa xét nghiệm tương ứng với mục **SINGLE** hoặc **MULTI**.

Bước 3: Chọn chế độ chạy nhanh (**QUICK TEST**) hoặc tiêu chuẩn (**STANDARD TEST**).

Bước 4: Đặt que test vào khay và đóng chặt khay đựng hóa chất, chọn tiếp **START**.

Bước 5: Kết quả sẽ hiển thị trên máy khi chạy xong. Nhấn **PRINT** để in kết quả.

Bước 6: Mở khay đựng hoá chất, đẩy thanh trượt vào bên trong để que test rơi xuống hộp đựng que thải.

Bước 7: Chọn **NEXT SAMPLES** để chạy mẫu kế tiếp.



III. XEM LẠI LỊCH SỬ KẾT QUẢ

Bước 1: Trên màn hình chính, chọn mục **“RESULT”**

Bước 2: Màn hình sẽ hiện danh sách các kết quả. Chọn 1 kết quả bất kì và ấn **“REVIEW”** để xem lại chi tiết kết quả.

Bước 3: Chọn kết quả của bệnh nhân cần tìm và ấn **“PRINT”** để in kết quả đó.

IV. TẮT MÁY

Bước 1: Quay về màn hình chính

Bước 2: Ấn nút tắt nguồn **“SHUTDOWN”** ở góc bên phải phía trên màn hình để vào giao diện **“SHUTDOWN AND LOG OUT”**.

Bước 3: Chọn tiếp **SHUTDOWN** và **YES**, cuối cùng tắt công tắc nguồn của máy.