

## FARAŞ SEDYE KULLANIMI ÖĞRENİM REHBERİ

BASAMAKLAR	+/-
1. Kişisel koruyucu ekipmanları kullanma	
2. Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verme	
3. Hastanın baş-boyun stabilizasyonu sağlama, uygun ölçüde boyunluk takma	
4. Sedeyi, baş ve ayak kısımlarına dikkat ederek hastanın yanına yerleştirme	
5. Sedyenin orta yan kısımlarında bulunan boy ayarlama pimlerini açma	
6. Sedyenin baş kısmı hastanın başını içine alacak, ayakları ise sedye boyunu aşmayacak şekilde boy ayarlamasını yapma	
7. Boy ayarlama pimlerini kapatma ve kilitleyip kilitlemediğini kontrol etme	
8. Baştaki kişinin komutu ile sedyenin baş ve ayak kısmındaki pimplere eş zamanlı basarak sedyeyi iki parça haline getirme	
9. Yarım paletleri hastanın üzerinden atlatmadan, etrafından geçirerek sağ ve sol tarafına yerleştirme	
10. Bir personel baş-boyun stabilizasyonunu sağlarken diğer iki personel ile hastayı <u>kütük çevirme yönteminde olduğu gibi 90° çevirip hızlıca sırt muayenesi yapma ve yarım paleti yerleştirme</u> . (Diğer taraf için kütük çevirme yapmadan sadece palet yerleşecek kadar çevirme)	
11. Baştaki personelin komutu ile baş ve ayak tarafında yer alan pimplere basılarak sedyeyi kilitleyerek tek parça haline getirme	
12. Kilitletiğini kontrol etme	
13. Sedye üzerine alınan hastayı en az üç bölgeden (göğüs-pelvis-uyluk) emniyet kemerleri ile sabitleme	
14. Aktarma yapılacak olan sedyeyi mümkün olan en yakın yere getirme	
15. İki kişi ile kaldırma ilkelerine uygun olarak ve baştaki kişinin komutu ile sedyeyi kaldırma	
16. Üzerinde hasta/ yaralı bulunan faraş sedyeyi vakum sedye ya da omurga tahtası üzerine yerleştirme	
17. Faraş sedyeyi pimplere basarak açma, kaşıkları hastanın altından ve sedye üzerinden uzaklaştırma	
18. Faraş sedyeyi birleştirme ve ambulanstaki yerine yerleştirme	