



FICHA TÉCNICA

Produto:

Cesto em acrílico cristal

DESCRIÇÃO:

O cesto em acrílico cristal é um instrumento médico utilizado para acomodar e transportar recém-nascidos em hospitais e clínicas. Pode ser utilizado em hospitais, maternidades, clínicas e consultórios médicos

DADOS TÉCNICOS:

Material: Chapa Cast Acrílico Cristal

Cor: Transparente

Medida: 730 x 410 mm

Espessura: 3mm

Capacidade: 21kg

INSTRUÇÃO DE USO:

1. O berço deve ser posicionado em um local seguro e estável;
2. O bebê deve ser colocado no cesto acrílico com cuidado;
3. O berço pode ser movimentado com segurança pelos profissionais de saúde.

PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE ROTINA:

1. O cesto pode ser limpo com água e sabão neutro, seguido de enxágue com água limpa.
2. Posicionar o produto em local seguro e estável.
3. Acondicionar o produto de modo a ficar protegido contra contaminação até a sua utilização.

MANUTENÇÃO:

Verifique periodicamente a integridade física do produto. A durabilidade está diretamente relacionada com a manutenção adequada e o número de vezes pelo qual foi submetido ao processo de desinfecção.

ARMAZENAMENTO:

Deve ser armazenado em local limpo, fresco e seco, sob temperaturas entre 5°C e 35°C e umidade relativa do ar entre 40 e 75%. Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos. Para transporte são admitidas variações de $\pm 5^\circ\text{C} / 5\%$.

Acriltech Soluções em Acrílico Ltda.

R. Srg. da Aeronáutica José Pereira Alves, 136 - Cidade Jardim Cumbica – Guarulhos – SP

CEP: 07182-040

CNPJ: 37.830.624/0001-46

GARANTIA:

O produto é garantido pelo prazo de 90 dias, contra defeitos de fabricação a partir da data de compra pelo consumidor final, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra, desde que seja obedecida esta instrução. Despesas de transporte e outras são de responsabilidade do comprador.