



	BỆNH VIỆN SẢN-NHI CÀ MAU KHOA KSNK	Mã số	QTKT-XLDC-KSNK- 02
		Phiên bản	1.0
	<i>Chủ đề</i> QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ KHÔNG CHỊU NHIỆT BẰNG NHIỆT ĐỘ THẤP TẠI KHOA KSNK	Ngày ban hành	

	Người biên soạn	Người xem xét	Người phê duyệt
Họ tên	Bs Trần Ngọc Hà	Bs Trần Thiên Lý	
Ký tên			
Ngày	 /..... /.....	 /..... /.....	 /..... /.....

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Số phiên bản	Vị trí sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ngày sửa đổi	Người sửa đổi

Tài liệu nội bộ

Mục lục
I. MỤC ĐÍCH
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
III. TRÁCH NHIỆM
IV. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT
V. NỘI DUNG THỰC HIỆN
VI. LƯU TRỮ HỒ SƠ
VII. TÀI LIỆU LIÊN QUAN
VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. MỤC ĐÍCH

Mục đích	- Phòng ngừa nhiễm khuẩn chéo khi thực hiện các can thiệp bằng dụng cụ trên người bệnh. - Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế khi tiếp xúc với các dụng cụ. - Đảm bảo duy trì độ bền của dụng cụ
----------	---

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Phạm vi áp dụng	Đơn vị tiết khuẩn trung tâm khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn
-----------------	--

III. TRÁCH NHIỆM

Trách nhiệm	Nhân viên y tế được phân công xử lý dụng cụ tại đơn vị tiết khuẩn trung tâm
-------------	---

IV. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Định nghĩa, thuật ngữ	
Chữ viết tắt	KSNK: Kiểm soát nhiễm khuẩn XLDC: Xử lý dụng cụ QTKT: Quy trình kỹ thuật PTNS: Phẫu thuật nội soi

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Bước 1	Dụng cụ sau khi sử dụng (đã được xử lý ban đầu) từ các khoa chuyển đến bàn giao cho trung tâm tiệt khuẩn.
Bước 2	Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra mức độ làm sạch, chức năng dụng cụ, nếu chưa sạch thì làm lại, tùy theo loại dụng cụ mà chọn phương pháp khử khuẩn phù hợp.
Bước 3	Phân loại dụng cụ để hấp nhiệt độ thấp như: PTNS tổng quát/ ổ bụng, PTNS lồng ngực, PTNS tiết niệu, PTNS tai mũi họng, PTNS khớp, các bộ vi phẫu, các tay khoan và pin, các loại dao cắt nội soi, các loại dây đốt điện, tay đèn, lưới đèn đặt nội khí quản có bóng,... Chú ý: Không xử lý các chất liệu vải, xenlulo, dung dịch.*
Bước 4	Làm khô bề mặt, dụng cụ phải khô hoàn toàn. Xếp dụng cụ vào khay, đặt chỉ thị hóa học.
Bước 5	Đóng gói trong những túi ép chuyên dụng hoặc tấm gói chuyên dụng. Ghi hạn sử dụng, cho vào lò hấp nhiệt độ thấp và chọn đúng quy trình xử lý dụng cụ.
Bước 6	Lưu trữ tại kho dụng cụ có kiểm soát nhiệt độ và vi sinh, cấp phát cho các khoa sử dụng.

VI. Lưu trữ hồ sơ

Lưu trữ hồ sơ	
----------------------	--

VII. Tài liệu liên quan

Tài liệu liên quan	Hướng dẫn biên soạn quy trình thực hành chuẩn
---------------------------	---

VIII. Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo	- Thông tư 18/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018 quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. - Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27/01/2012 hướng dẫn thực hành khử khuẩn, tiệt khuẩn (6 hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ y tế năm 2012). - Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 28/08/2017 hướng dẫn thực hành khử khuẩn, tiệt khuẩn (6 hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ y tế năm 2017).
---------------------------	---

LƯU ĐỒ QUY TRÌNH
XỬ LÝ DỤNG CỤ KHÔNG CHỊU NHIỆT BẰNG NHIỆT
ĐỘ THẤP TẠI KHOA KSNK

XỬ LÝ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI

**Bước 1**

Dụng cụ từ các khoa chuyển đến

Bước 2

Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, chọn phương pháp khử khuẩn phù hợp (ngâm hóa chất, xử lý bằng máy hấp nhiệt độ thấp

Bước 3

Phân loại dụng cụ để hấp nhiệt độ thấp như: PTNS tổng quát/ ổ bụng, PTNS lồng ngực, PTNS tiết niệu, PTNS tai mũi họng, PTNS khớp, các bộ vi phẫu, các tay khoan và pin, các loại dao cắt nội soi, các loại dây đốt điện, tay đèn, lưới đèn đặt nội khí quản có bóng,...

Chú ý: Không xử lý các chất liệu vải, xenlulo, dung dịch.*

Bước 4
444:

Làm khô bề mặt, dụng cụ phải khô hoàn toàn.
Xếp dụng cụ vào khay, đặt chỉ thị hóa học.

Bước 5

Đóng gói trong những túi ép chuyên dụng hoặc tấm gói chuyên dụng.
Ghi hạn sử dụng, cho vào lò hấp nhiệt độ thấp và chọn đúng quy trình xử lý dụng cụ.

Bước 6

Lưu trữ hay cấp phát các khoa sử dụng.