

Джойстик

Джойстик – полностью интегрированное ассистивное устройство, беспроводная система, сочетающая в себе функции мыши и джойстика, предназначенная для лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, при которых отмечаются выраженные ограничения в двигательных возможностях рук.

Использование той или иной насадки (шар, рычаг, ручка) зависит от конкретного пользователя и его хвата. Под него выбирается одна из трёх насадок. Три разноцветные кнопки аналогичны кнопкам обычной мышки: жёлтая соответствует левой кнопке, синяя — правой, а зелёная позволяет выделить тот или иной объект на экране.

В джойстике есть возможность подключения выносных компьютерных кнопок для облегчения его использования людям с тяжёлыми нарушениями моторики.

Данное оборудование может применяться:

- в домашних условиях в процессе дистанционного обучения; при выполнении заданий для самостоятельной работы; при использовании компьютера/ноутбука для повседневных задач
- в вузе на практических занятиях, на которых предполагается использование компьютера/ноутбука.

Инструкция по подключению беспроводных джойстиков:

Чтобы подключить джойстик должен быть сопряжен с приемником SimplyWork Receive. Чтобы установить сопряжение необходимо:

1. Снимите крышку батарейного отсека джойстика;
2. Поместите приемник не дальше, чем на 1 метр, от джойстика
3. Нажмите кнопку «Pair» на приемнике. Светодиодный индикатор на приемнике начнет медленно мигать.
4. В течение 10 секунд нажмите кнопку «Pair» внутри батарейного отсека джойстика

5. Через некоторое время светодиодный индикатор начнет гореть постоянно в течение 5 секунд, указывая на то, что сопряжено завершено.

Устройство готово к использованию.

Если светодиодный индикатор перестанет мигать и не горит постоянно, повторите процедуру, начиная с 3 пункта.

Инструкция по подключению проводных джойстиков:

1. Выключите компьютер и отсоединить от него мышь (если она была подсоединена).
2. Вставьте штекер в разъем для мыши на компьютере. *(Штекеры сконструированы таким образом, что вставить их в разъем можно только в правильном положении, поэтому, если штекер «не идет», не применяйте силу, а поверните его в нужное положение.)*
3. Включите компьютер. Во время запуска не двигайте джойстик в течение 5 секунд, поскольку это может сбить положение курсора.

Теперь устройство готово к работе. Этот трекбол/джойстик полностью заменяет мышь, поэтому не требует установки дополнительных драйверов или иного программного обеспечения.