



Інструкції по встановленню програми:

1. Скачайте репозиторій:
 - a. Зайдіть на сайт <https://github.com/p-p-m/telecardio>
 - b. Натисніть на зелену кнопку “Code”:

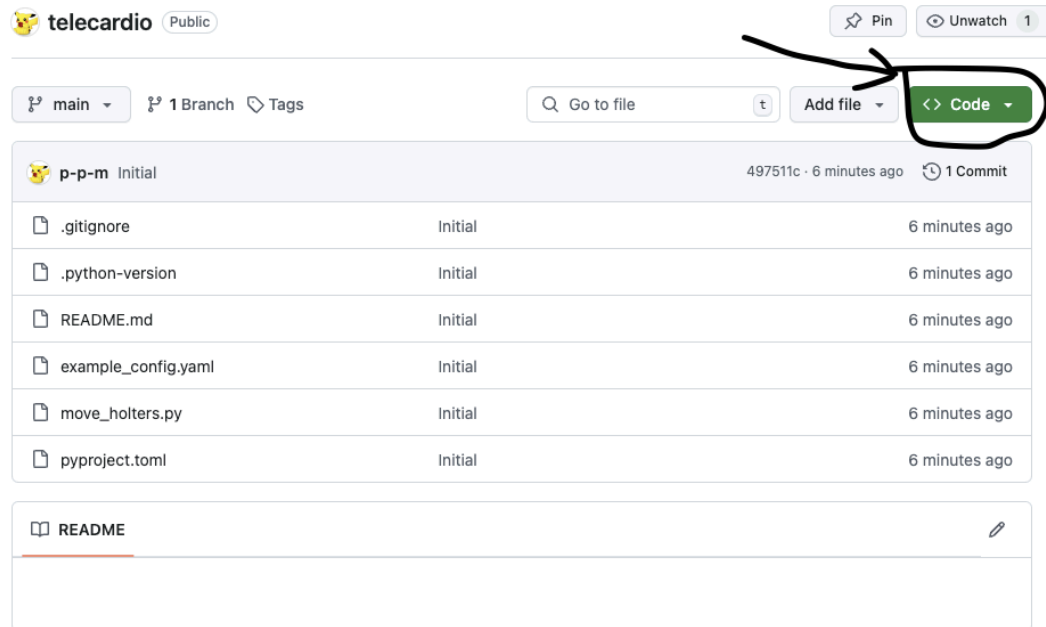

c. Натисніть “Download ZIP”:

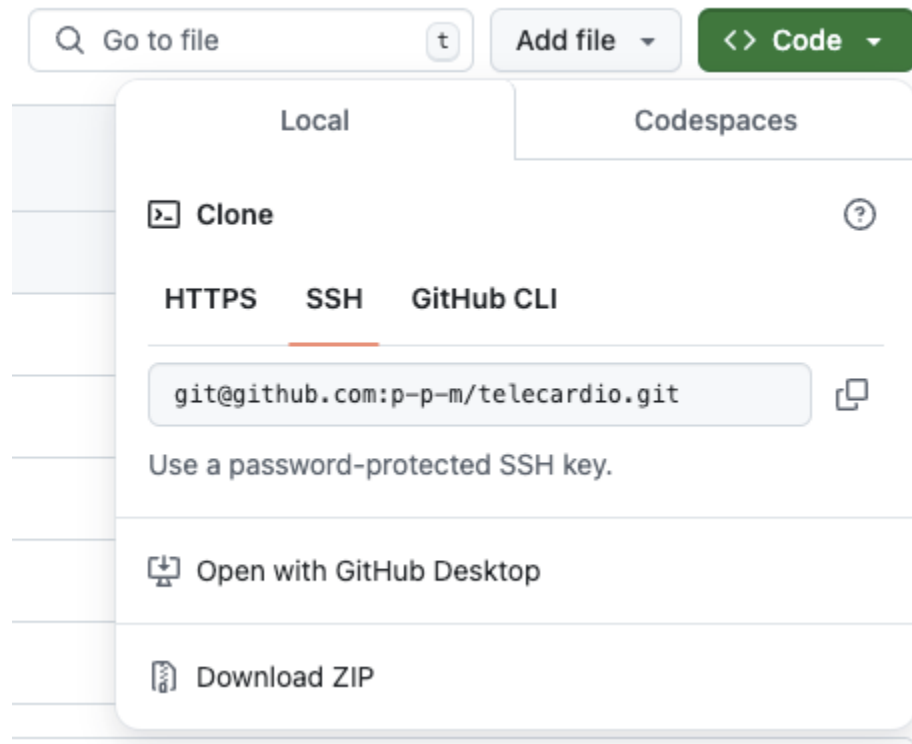

d. Розпакуйте zip архів там де хочете бачити проект. Має з'явитись папка telecardio-main.

2. Через термінал перейдіть до папки telecardio-main та запустіть “pip install -r requirements.txt”. Мають поставитись бібліотеки, які необхідні для роботи з програмою.
3. Скопіюйте файл example_config.yaml. Новий файл має мати ім'я config.yaml. Відкрийте його в текстовому редакторі та відредагуйте, всі інструкції всередині файла. Про формат yaml можна прочитати тут: <https://www.cloudbees.com/blog/yaml-tutorial-everything-you-need-get-started> або запитати в чата GPT. Можете використовувати yaml editor (наприклад <https://codebeautify.org/yaml-editor-online>) щоб переконатись що формат збережено.
4. Запустіть веб сервер командою “python web.py”. Сервер має хоститись на <http://127.0.0.1:5000>. При запуску сервера автоматично запускається розподілення холтерів. Зупинити розподілення можливо через зупинку config меню в веб інтерфейсі.