

Elektromos Fülzsír Eltávolító – 500 ml Fülöblítő, 4 Nyomásfokozat, LED Világítás



Használati utasítás – W30 Elektromos Fülzsír Eltávolító

1. A készülék rendeltetése

A W30 elektromos fülzsír eltávolító otthoni használatra készült eszköz, amely vízszugaras fülöblítéssel segít eltávolítani a fülzsírt. A készülék

több nyomásfokozattal és LED világítással rendelkezik a biztonságos és hatékony tisztítás érdekében.

2. A csomag tartalma

- W30 elektromos fülzsír eltávolító készülék
- 500 ml-es víztartály
- Fülöblítő fúvóka
- USB töltőkábel
- Használati útmutató

3. A készülék előkészítése

- Az első használat előtt töltsse fel a készüléket USB-kábellel.
- A teljes töltési idő körülbelül 2,5 óra.
- Töltés közben ne használja a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a víztartály és a fúvóka megfelelően van rögzítve.

4. A víztartály feltöltése

- Csavarja le vagy vegye le a víztartályt.
- Töltsse fel **langyos (nem forró)**, tiszta vízzel.
- Szükség esetén adható hozzá kevés fiziológiás sóoldat.
- Zárja vissza a tartályt biztonságosan.

5. Használat lépései

- Hajoljon mosdó vagy törölköző fölé.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Válassza ki a kívánt nyomásfokozatot – első használatkor mindig a **legalacsonyabb fokozattal** kezdjen.
- Óvatosan helyezze a fúvókát a hallójárat bejáratához. **Ne vezesse mélyen a fülbe.**

- Indítsa el az öblítést rövid szakaszokban.
- Hagyja, hogy a víz és a fülzsír kifolyjon.
- Szükség esetén ismételje meg a műveletet a másik fülön.

6. LED világítás

A beépített LED fény segíti a pontosabb használatot és jobb láthatóságot biztosít, különösen gyenge fényviszonyok mellett.

7. Használat után

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Ürítse ki a víztartályt.
- Szárítsa meg a fúvókát és a tartályt.
- A készüléket száraz helyen tárolja.

8. Tisztítás és karbantartás

- A víztartály és a fúvóka meleg, szappanos vízzel tisztítható.
- A fő egységet **tilos vízbe meríteni** – csak enyhén nedves ruhával törölje át.
- Rendszeres tisztítással biztosítható a higiénikus használat.

9. Biztonsági figyelmeztetések

- Ne használja sérült dobhártya, fülgyulladás vagy fájdalom esetén.
- Gyermek csak felnőtt felügyeletével használhatja.
- Ne használja túl gyakran – szükség szerint, alkalmanként ajánlott.
- Ha szédülést, fájdalmat vagy kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba a használatot.

10. Műszaki adatok (röviden)

- Akkumulátor: 2000 mAh
- Tartály kapacitás: 500 ml
- Működési idő: 4–8 óra

- Töltési idő: kb. 2,5 óra
- Teljesítmény: 1,5 W
- Tanúsítvány: CE