

Навіщо потрібно збирати біоматеріал?

Це важливий крок для того, щоб ми могли точно проаналізувати ДНК вашого улюбленця. Не хвилюйтеся! Забір епітелію — абсолютно безболісна і безпечна процедура.

КРОК 1: Підготуйте все необхідне

- ✓ Оформлення замовлення.

Заповнити всі дані можна на сайті через особистий кабінет, або заповнення паперової анкети в СОВА ГЕНЛАБ.

- ✓ Якщо біоматеріал надає ветеринар, роздрукуйте бланк про ідентифікацію тварини.

✓ Паперовий пакет для біоматеріалу (можна скласти самостійно з аркуша паперу) *(паперовий пакет для 4 в 1)*

✓ 4 ватні палички або ендоцервікальні щіточки (Увага! зонд урогенітальний не підходить)

- ✓ Поштовий конверт

- ✓ Копія родоводу (за наявності)

КРОК 2: Підготовка тварини

! Не годуйте тварину за 1-2 години до забору. Рекомендується кошенятам і цуценятам відкласти забір біоматеріалу, якщо ще відбувається годування материнським молоком.


! Не давайте пити воду за 1-2 годину до процедури.

! Не допускайте контакту з іншими тваринами 2 години. Уникаємо сторонньої ДНК.

! Не забувайте мити руки перед кожним забором матеріалу.

КРОК 3: Забір біоматеріалу

1. Підпишіть паперовий пакет для біоматеріалу: вкажіть ім'я тварини та номер онлайн замовлення.
2. Тримайте щіточку лише за кінець. Торкатись ватної частини — суворо заборонено.
3. Вільною рукою зафіксуйте голову тварини. Обережно введіть щіточку в простір між внутрішньою поверхнею щоки та яснами.
4. Обертайте щіточку 10 сек з легким натиском.
5. Уникайте надлишку слини.

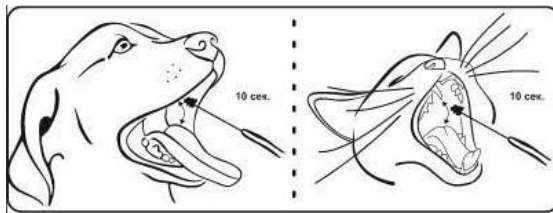

6. Обріжте кінець щіточки, за який ви тримали, а саму щіточку покладіть у підготовлений паперовий пакет.
7. Повторіть процедуру з трьома іншими щіточками. Всі палички слід скласти в 1 паперовий пакет.
Не загортайте ні щіточки, ні сам пакет з щіточками в поліетиленові пакети, плівку чи колби.

КРОК 4: Відправка

В поштовий конверт покладіть:

- ✓ Підписаний паперовий пакет зі щіточками
- ✓ Паперову анкету (якщо не надіслали онлайн)
- ✓ Підтвердження ідентифікації тварини (якщо не надіслали онлайн)
- ✓ Родовід (якщо є)

Заклейте поштовий конверт.

Реквізити Нової Пошти:

Київ, НП №317

Отримувач: ТОВ "Сова", ЄДРПОУ 44785149

Телефон: +38 (098) 391 35 59

Будь ласка, врахуйте, що вартість доставки покриває Відправник.

КРОК 5: Оплата (2 варіанти)

- Через особистий кабінет
- Рахунок за реквізитами
(виставляється адміністратором при надходженні замовлення в СОВА ГЕНЛАБ)

Важливо:

Тварина вважається ідентифікованою, якщо ветеринар або представник клубу:

- сканує чіп або звіряє тавро,
- відбирає біоматеріал для дослідження,
- заповнює анкету, вказуючи: ПІБ, телефон, e-mail, назву та адресу клініки, ставить підпис і печатку, зазначає, яким способом проведено ідентифікацію.

Цими діями він підтверджує, що біоматеріал дійсно належить саме цій тварині.

Якщо здаєте біоматеріал в СОВА ГЕНЛАБ, тварина вважається ідентифікованою, при умові, якщо тварина має чіп\тавро.

Якщо біоматеріал відбираєте самостійно або тварина не має чіпа/тавра, у результатах буде вказано, що **ідентифікація тварини не проведена**.

Якщо у вас виникли запитання — ми завжди раді допомогти.

Бажаємо успішного тесту та здоров'я вашому улюбленцю!