

Plenia



Guide d'utilisation – Prothèse **Snap-On Smile**



Contenu du kit :

- 1 prothèse dentaire (haut et/ou bas)
- 1 boîte de rangement
- 1 manuel d'utilisation



Étapes pour bien utiliser votre prothèse:

1. Faites chauffer de l'eau (non bouillante) à environ 70-80°C.
2. Trempez la prothèse pendant 1 minute. Elle deviendra plus souple.
3. Sortez-la et placez-la immédiatement sur vos dents.
 - Appuyez légèrement pour qu'elle prenne la forme de votre dentition.

- Attendez 30 secondes.
- 4. Retirez-la et laissez-la refroidir à l'air libre pendant 5 minutes.
- 5. Repositionnez-la ensuite sur vos dents pour vérifier le confort.

Conseils d'entretien :

- Nettoyez la prothèse après chaque usage avec de l'eau tiède et une brosse douce.
- Rangez-la dans sa boîte lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas mâcher ou manger avec la prothèse en bouche.
- Ne jamais utiliser d'eau bouillante (elle pourrait se déformer).

Attention :

- Ne convient pas aux enfants.
- Ne remplace pas un traitement dentaire professionnel.
- Ce produit est à usage esthétique et temporaire uniquement.

Politique de retour :

 Le remboursement est possible uniquement si le produit est non utilisé et retourné dans les 48h après livraison, dans son emballage d'origine.

Tout produit utilisé, modifié ou chauffé ne peut être ni repris ni remboursé.