

## Радио класс

Радио класс — это FM-система, которая обеспечивает передачу четкой и разборчивой речи (музыки) на слуховые аппараты и кохлеарные импланты людей с нарушенной функцией слуха. Готовый к использованию комплект оборудования, включающий коллективный передатчик звука с микрофоном, индивидуальные FM-приемники и зарядное устройство для них.

Радио класс разработан для лиц с нарушением слуха, при котором отмечается преходящее или стойкое снижение остроты слуха (способности воспринимать звуки низкой интенсивности) и объема звука (сужение частотного диапазона или неспособность слышать определенные частоты). Радио класс обеспечивает условия для комфортного обучения студентов с различными нарушениями слуха, а также индивидуальную работу со слабослышащими, может использоваться в качестве речевого тренажера.

Данное оборудование может применяться:

- в лекционных аудиториях, в смешанных группах, в учебных классах;
- на экскурсиях в музеях, в учреждениях культуры и на открытом воздухе;
- Общение (переговоры) в сложных акустических ситуациях: на стадионе, на вокзале, в общественных местах;

Чтобы подключить радиокласс необходимо:

1. Убедитесь, что устройства заряжены.
2. Установить на передатчике переключатель в положение «включено»;
3. Закрепить микрофон на одежде, передатчик на поясе или в кармане одежды;
4. Подключить в гнездо для наушников приемника *наушники, заушный индуктор или индукционную петлю*;
5. Отрегулировать громкость при помощи регулятора;
6. Установить переключатель включения на приемнике в положение I (слышно только преподавателя) или II (слышно аудиторию)

7. Установить регуляторы частот приемника и передатчика на одинаковую частоту (При совпадении частот у приемника загорится зеленый индикатор)

Устройство готово к работе.

Для того, чтобы выключить приемники и передатчик установите переключатели на приемниках и передатчике в положение «выключено».

Для зарядки устройств используется зарядное устройство, входящее в комплект.