

Что нового в релизе HS PE v1.1.0-beta

Переработан механизм рисования аннотаций.....	1
Раздел “О программе” перенесен на страницу настроек.....	2
Добавлен индикатор свободного места в хранилище медицинских изображений.....	2
Добавлен раздел управления лицензиями для администратора.....	3
Переработан механизм деления области просмотра при добавлении нечетного количества вьюпортов.....	3
Обновлен дизайн панели меню и таблиц данных.....	4
Реализована возможность интеграции с ЛИС “Labforce”.....	4
Исправлены известные дефекты.....	4


Переработан механизм рисования аннотаций


Цель:

Повысить удобство работы с графическими аннотациями

Описание:

- Рисование графической аннотации завершается диалоговым окном с предложением поменять название добавить описание, выбрать цвет или отменить рисование фигуры
- Изменен механизм рисования фигур – нет необходимости удерживать клавишу мыши при рисовании
- Добавлена возможность управлять аннотацией через контекстное меню
- Изменен дизайн фигур и листа аннотаций

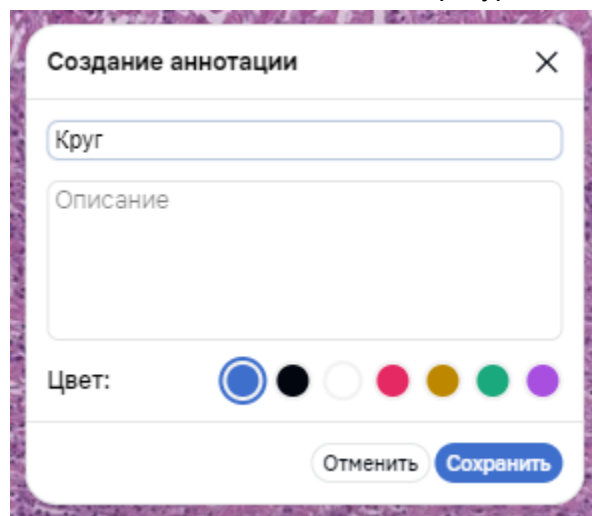

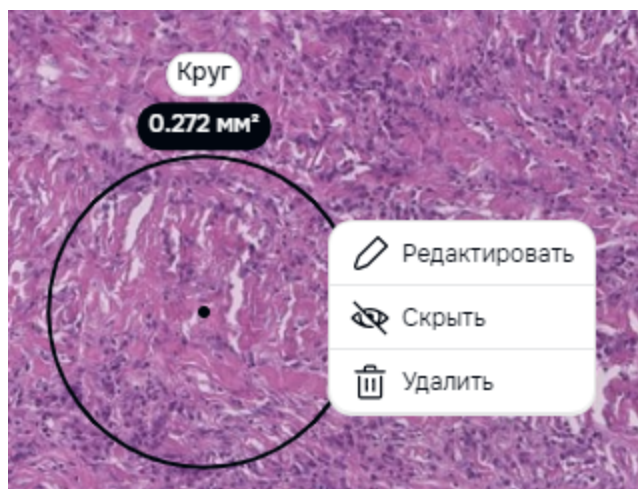


Раздел “О программе” перенесен на страницу настроек

Цель:

Систематизировать настройки и вспомогательную информацию в отдельном разделе

Описание:

- Переход в раздел “Настройки” осуществляется через контекстное меню на иконке пользователя

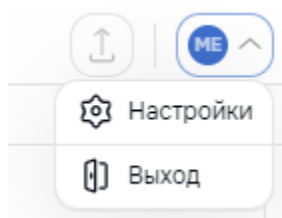


Добавлен индикатор свободного места в хранилище медицинских изображений

Цель:

Уведомить пользователя об оставшемся свободном месте в хранилище

Описание:

- В разделе “Настройки” на панели вкладок отображается занятое место из доступного
- При превышении предоставляемых пороговых значений система уведомляет пользователя при авторизации
- При недостаточном свободном месте система не позволяет загрузить изображения

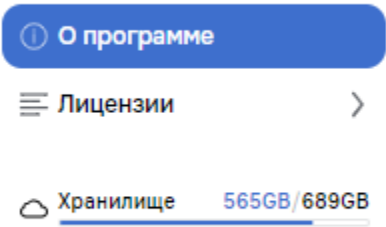


Добавлен раздел управления лицензиями для администратора

Цель:

Просматривать набор лицензий и управлять ими для настройки функциональности продукта

Описание:

- В разделе “Настройки” во вкладке “Лицензии”
 - добавлены механизмы управления лицензиями
 - Добавлены индикаторы ресурса установленных лицензий

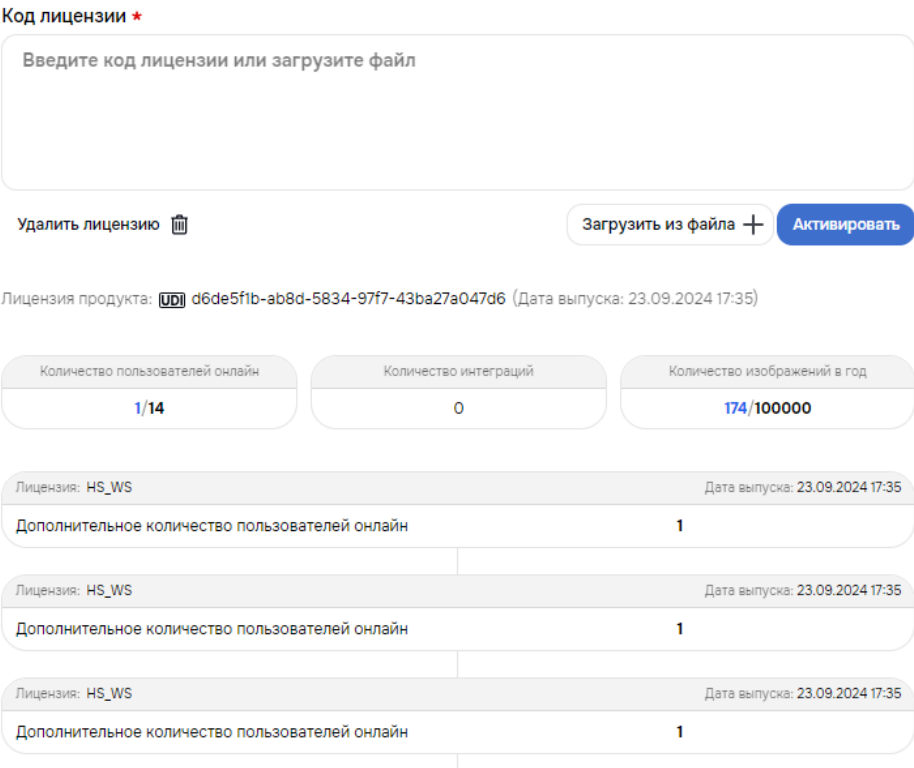


Переработан механизм деления области просмотра при добавлении нечетного количества вьюпортов

Цель:

Повышение эффективности использования экранного пространства

Описание:

- Нечетное количество вьюпортов занимает всё доступное место области просмотра

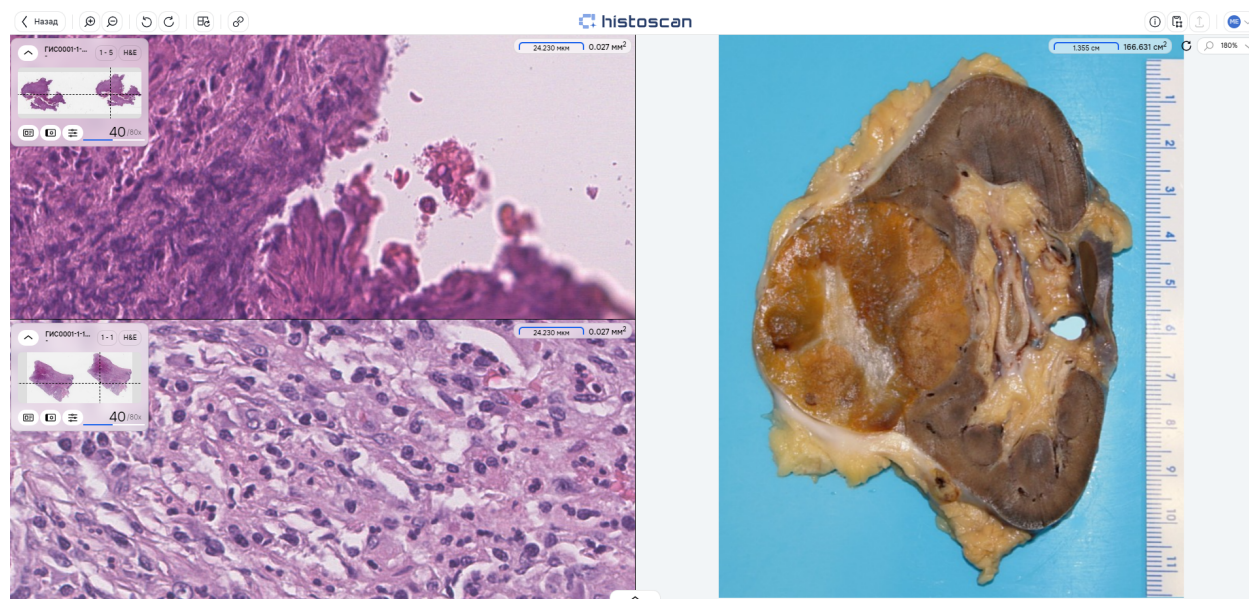

Обновлен дизайн панели меню и таблиц данных

Цель:

Повысить удобство и восприятие пользователя при работе с таблицами

Описание:

- Добавлена анимация при наведении на запись таблицы
- Добавлена анимация при обновлении содержимого таблицы
- Добавлена анимация при клике по записи таблицы
- Обновлен дизайн компонентов пользовательского интерфейса
- Добавлена возможность фильтра по идентификатору слайда в списке "Все слайды"

Реализована возможность интеграции с ЛИС "Labforce"

Цель:

Получить информацию о случае и пациенте из внешней системы для исключения ручного ввода

Описание:

- Добавлено создание нового пациента по информации из ЛИС
- Добавлено создание нового случая по информации из ЛИС
- Добавлено создание нового исследования по информации из ЛИС
- Добавлено создание нового заключения по информации из ЛИС
- Добавлено открытие просмотра случая по ссылке из ЛИС
- Добавлено информирование ЛИС о загрузке изображений

Исправлены известные дефекты

Цель:

Устранение выявленных дефектов программного обеспечения