



Шаг 1. Вам на почту приходит исследование пациента в архиве. Для того чтобы его открыть, следует **СКАЧАТЬ АРХИВ**

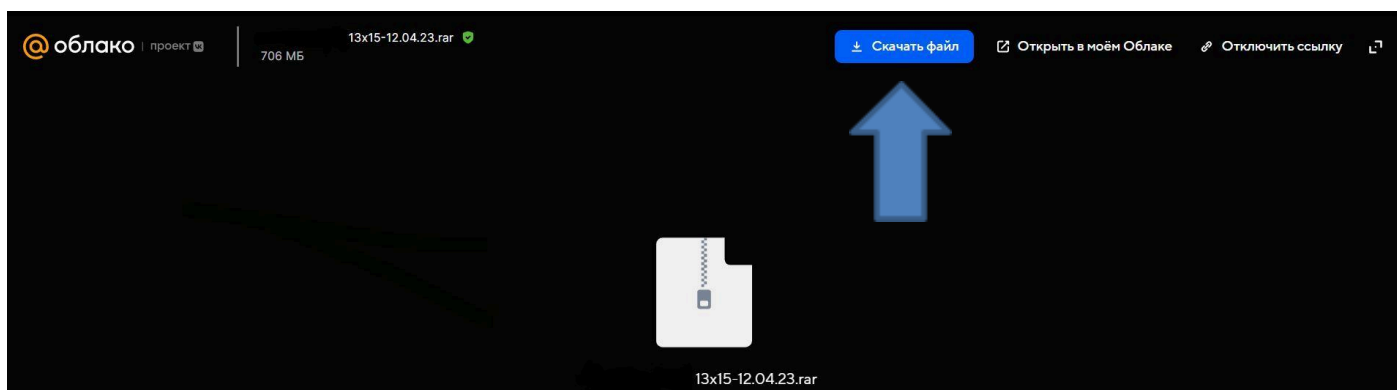


Либо



Шаг 2. Происходит скачивание, это займет 3-4 минуты (в зависимости от скорости интернета)

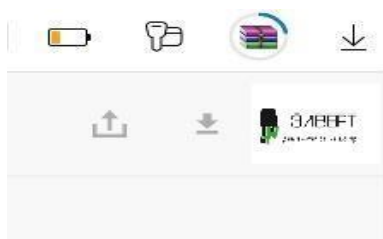


Шаг 3. Исследование скачалось, появилась галочка, правой кнопкой мыши нажимаем и выбираем **«Показать в папке»**

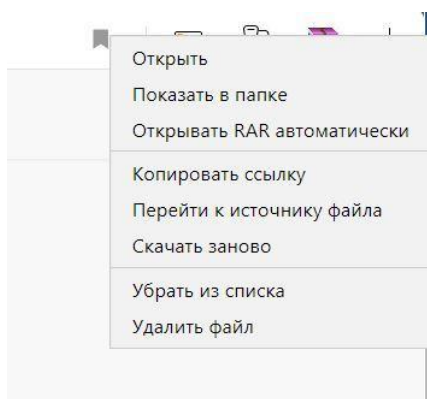

Шаг 4. Открывается окно загрузки, либо вы можете перейти в него самостоятельно. В нем мы видим скаченный нами **АРХИВ**, далее нам нужно его **извлечь**

Шаг 5. Далее правой кнопкой мыши нажимаем на архив, появляется окно и нужно выбрать **Извлечь в текущую папку**, происходит разархивирование

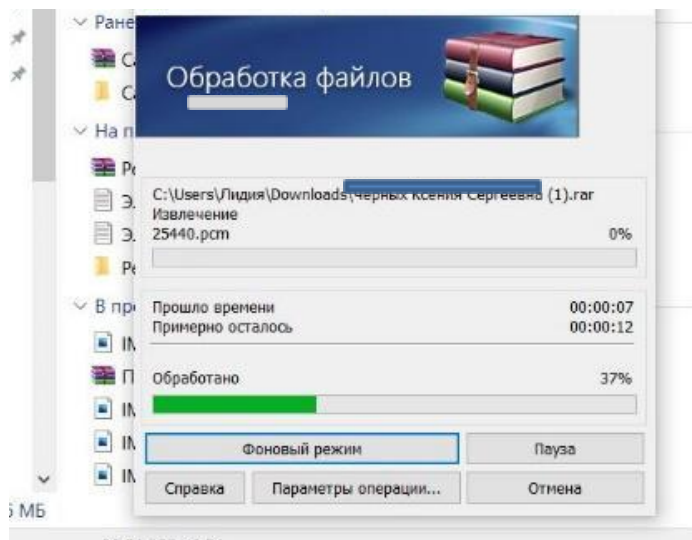

Шаг 6. Появляется папка с указанием фамилии пациента, открываем ее (также ее можно скопировать в любое удобное для вас место), дважды щелкаем на значок **CDViewer**, открывается исследование (если не открывается с 1 раза, нажимаем еще раз)

| Имя | Дата изменения | Тип | Размер |
|---------------------------------|------------------|----------------------|----------|
| AppFiles | 24.12.2020 14:25 | Папка с файлами | |
| IMGDATA | 24.12.2020 14:25 | Папка с файлами | |
| Autorun | 24.12.2020 13:21 | Сведения для уст... | 1 КБ |
| CDViewer | 27.07.2017 17:56 | Приложение | 296 КБ |
| LUCIONCD.MDE | 24.12.2020 14:24 | Файл "MDE" | 6 336 КБ |
| OnDemand3D_CD_Viewer_Instructor | 27.07.2017 17:55 | Microsoft Edge PD... | 272 КБ |

Шаг 7. В открывшемся окне появляется строка с исследованием. Нажимаем 1 раз на «+» слева от ID

База данных DICOM CD
Программа OnDemand3D Project Viewer огранич. БД

- Тип: OnDemand3DDental
- Общий

Поиск

| ID / 3 | Имя пациента / 2 | Дата / 1 | Описание | #Изобр. | Мода... | Пояснения |
|-------------------|-----------------------------|------------|----------|---------|---------|-----------|
| 20211019170421236 | Бондарев^Денис Олегович (М) | 2021-10-19 | | 313 (2) | | |

номера




Шаг 8. Появляются 2 строки с проектом и исследованием. Дважды щелкаем на проект (иконка папки с кубиком) – нижняя строчка

| ID / з | Имя пациента / 2 | Дата / 1 | Описание | #Изобр. | Мода... |
|-------------------|-----------------------------|------------|----------|---------|---------|
| 20211019170421236 | Бондарев^Денис Олегович (М) | 2021-10-19 | | 313 (2) | |
| -1 | | 2021-10-19 | | 312 | СТ |
| 1187 | | 2021-10-19 | 8x15 | 1 | PRJ |


Шаг 9. В открывшемся окне нажимаем кнопку «Открыть». Появляются окна и модули непосредственно снимка.

!!!В случае если в ШАГЕ 6 или 7 возникают проблемы(вас выкидывает из программы или вы видите серый экран), необходимо сделать следующее:

На своём компьютере заходите в меню Пуск, в строке поиска вводите *Установка и удаление программ*.

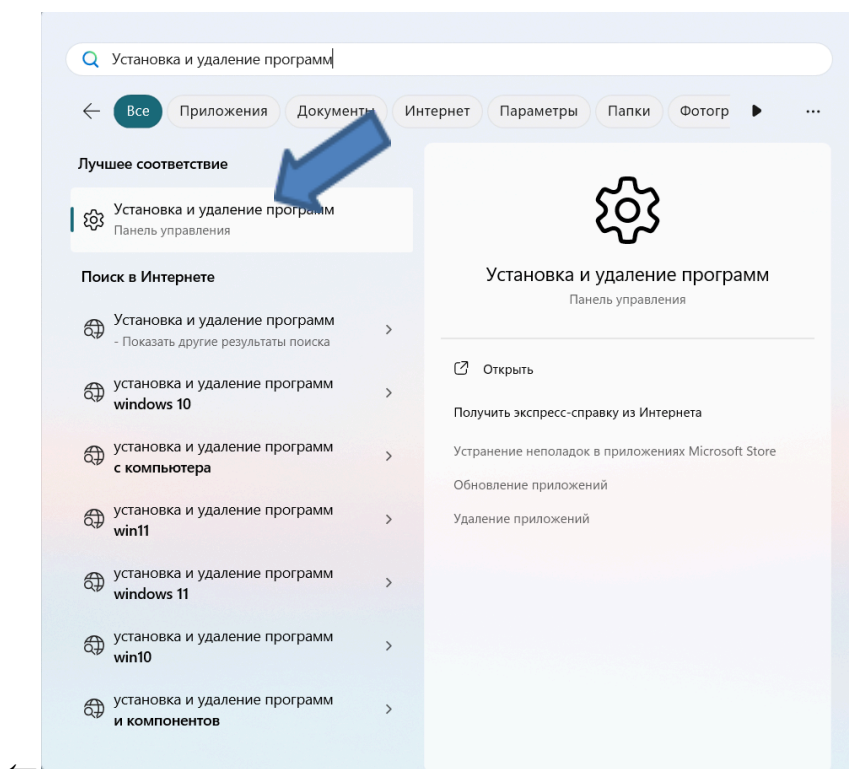

Далее откроется список компонентов, ищите строку *Microsoft Access database engine 2010(English)* удаляете его:

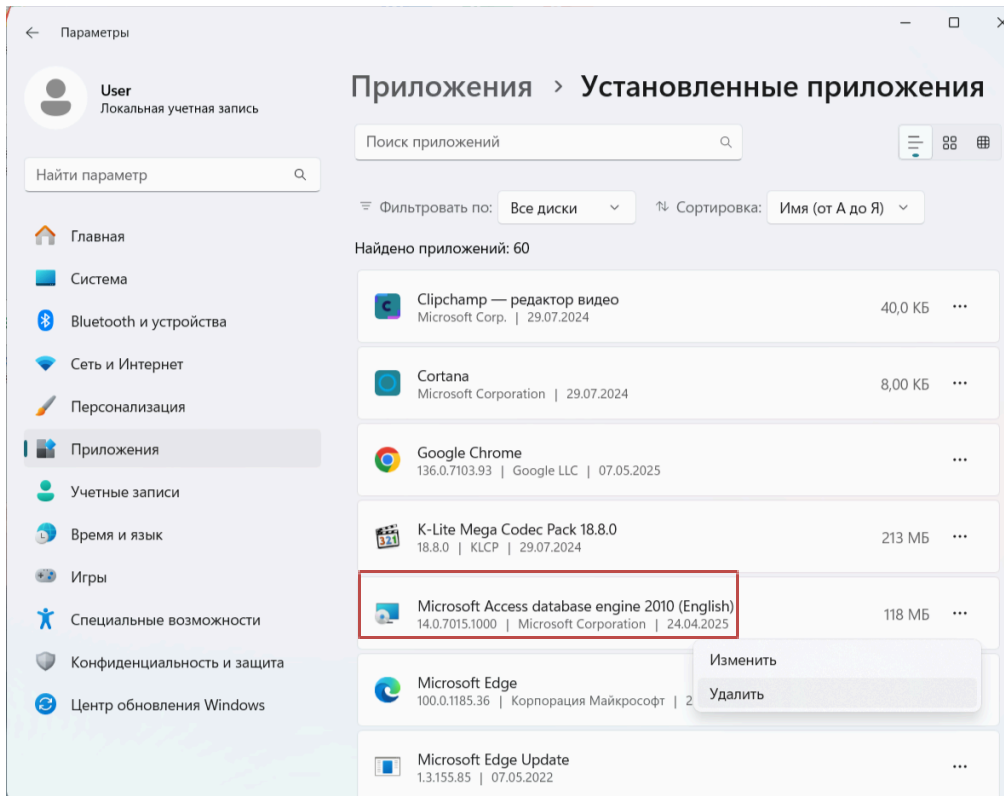

После удаления вернитесь к шагу 6 и продолжите открытие снимка, следуя дальнейшим шагам инструкции. Исследование загрузится и откроется.