

VIDEOLARINGO MAC GRATH.

Buenas, en el día de hoy hemos puesto en funcionamiento un nuevo videolaringo de la marca MAC Grath., que sustituye al anterior.



LOCALIZACION:

- EMERGENCIAS: VÍA AÉREA ADULTO
- CARRO DE PARADAS DE OBS.
- CARRO PARADAS DE UCI.

VIDEOLARINGO:



Cuidado con la pieza protectora señalizada:

- No tirar la pieza protectora de la cámara del viodolaringo
- Mantener siempre videolaringo con tapón protector.

USO: REUTILIBLE

Nº MATERIAL: 1

LIMPIEZA: tras su utilización, se llevará a cabo la limpieza del mismo por Frotación con compresa impregnada en **Líquido desinfectante de alto nivel**

PALAS:

USO: No reutilizable (**USO ÚNICO**)

Nº MATERIAL:

- **1** unidad del Nº 1, 2 y 3 en el carro de pediatría en Sala de Emergencias



Ilustración 1. Palas Nº: 1.2 y 3 desechables en Carro de Pediatría de Emergencias

- **3** unidades de Nº: 4 y del X3 en los Carros de Paradas de Adultos ubicados en Sala de Emergencias , OBS y UCI.



Ilustración 2,, Palas desechables Nº:4 y X3 en Carro de Paradas Adulto

Tras su uso, debemos tirarlas y reponerlas del despacho de la Coordinación de Enfermería

