

## BLux Gyerek Szemmasszírozó 3 Üzemmóddal – Párnázott, Asztronauta Mintás



### 1. Termékleírás

Ez a gyerek szemmasszírozó 3 választható masszázsmóddal (vibráció, melegítés, zenei funkció) segíti a szemfáradtság, szemfeszültség és száraz szemek enyhítését. A beépített hangszórók és előre rögzített nyugtató hangok fokozzák a relaxációs élményt. Az állítható fejpánt, és a puha PU bélés kényelmes viseletet biztosít, a 15 perces automatikus kikapcsolás pedig biztonságos használatot garantál.

### 2. Első használat előtt

Csomagolja ki a terméket.

Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan:

1 db szemmasszírozó

1 db Type-C töltőkábel

1 db használati útmutató

Töltse fel teljesen a készüléket az első használat előtt (kb. 2–3 óra).

### **3. Töltés**

Csatlakoztassa a Type-C kábelt a szemmasszírozó töltőportjához.

Dugja a másik végét USB-töltőbe vagy számítógép USB-portjába.

A töltés közben a jelzőfény világít, teljes töltésnél kialszik vagy színt vált.

### **4. Használati útmutató**

#### **Felhelyezés:**

Állítsa be a fejpántot úgy, hogy kényelmesen illeszkedjen a gyermek fejére.

Helyezze fel a szemmasszírozót úgy, hogy a szemek teljesen fedésben legyenek a puha PU párnákkal.

#### **Bekapcsolás és módválasztás:**

Nyomja meg a bekapcsológombot hosszan (2–3 másodperc) a készülék indításához.

A készülék automatikusan elindítja a zenét.

A masszázsmódok között rövid gombnyomással válthat:

**Vibrációs mód**

**Melegítés + vibráció**

**Melegítés + vibráció + zene**

#### **Időzítés:**

A készülék automatikusan kikapcsol 15 perc működés után.

### **5. Karbantartás**

A készüléket puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa.

Ne merítse vízbe, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek.

A puha PU bélés tisztán tartása érdekében rendszeresen törölje át.

### **6. Biztonsági figyelmeztetések**

Csak 6 éves kor felett használható, felnőtt felügyelete mellett.

Ne használja nyílt seb, gyulladás vagy szemfertőzés esetén.

Ne használja alvás közben.

Kerülje az ütést, rázkódást, erős nyomást a készüléken.

Töltés közben ne használja.

## **7. Tárolás**

Száraz, hűvös helyen tartsa.

Összecsukva, a védőtokban vagy a csomagolásban tárolja, hogy elkerülje a sérüléseket.